



PROCEDURE DE PRISE DE MESURE MANCHONS POUR LUNETTES AUDITIVES



1. Préparation de la prise de mesure :

Ce que vous aurez besoin :

- Les manchons du modèle que vous souhaitez appareiller.
- Des paires de lunettes avec une soie ou une armature de branche
- Un feutre indélébile ou feutre type « Posa » Fin de préférence couleur visible
- Les aides auditives de votre patient

Mettre l'aide auditives dans le manchon souhaité



2. Prise de mesure :

- Mettre en place le manchon avec l'aide auditive
- Mettre en place l'écouteur dans le Conduit auditif

Si besoin changer la taille de l'écouteur, sur certain patient une taille supérieur peut-être nécessaire.




- Mettre en position la paire de lunettes

Attention la paire de lunettes doit être positionnée correctement et suivant le souhait de votre client.

Le fil de l'écouteur rendra difficile tous changements de position.



- Prendre la mesure du manchon en traçant un trait devant celui-ci

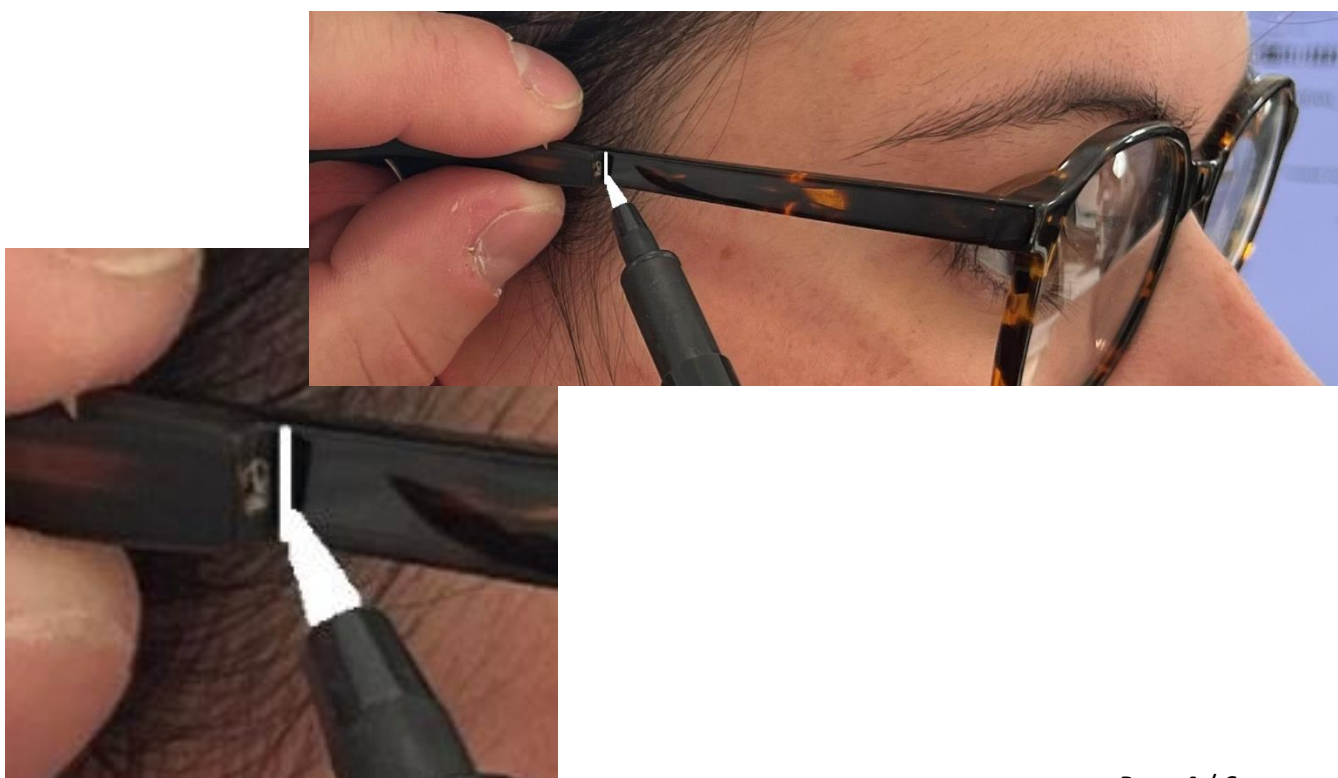

3. Découpe :

- Découper autour de l'armature de branche sans toucher l'armature de branche de branche pour ne pas fragiliser le montage avec un disque diamanté. Couper devant le marquage (le marquage doit être sur la branche restante)



- Avec une pince, retirer le reste autour de l'armature de la branche.
- Couper l'armature restante 3 cm à 3.5 cm est suffisant pour tous les manchons de la gamme.



4. Montage :

- Mettre en place le manchon auditifs



- Vérifier les dimensions avec votre client



- Si le positionnement est bon et validé avec votre patient coller les manchons.

Si vous le souhaitez le montage peut être fait par le Labopro après votre prise de mesure.